

# Basic



SIMPLY SWISS



Basic – OP-Absaugsystem

# Basic

## Die Absaugpumpe mit Schweizer Einfallskraft und Einfachheit

**Verlässliches, einfaches und hygienisches Absaugen.** Die Basic Pumpe ist eine verlässliche, einfache Absaugpumpe für alle Anwendungen im Krankenhaus, in der Klinik oder in der Arztpraxis, die ein Hochvakuum erfordern, einschließlich Endoskopie, Absaugen der Luftwege, vakuumunterstützte Entbindung/Kaiserschnitt und Wunddrainage.

**Denkbar einfach.** Bei der Entwicklung der Basic Absaugpumpe strebte Medela Einfachheit an. Sie können die Pumpe mit dem Fußschalter, der im Rollstativ integriert ist, oder mit der Taste am Gehäuse einschalten. Regulieren Sie das Vakuum mit dem intuitiven Membran-Vakuumregler. Mit dem optionalen Zubehör können Sie die Pumpe an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die einfache Konstruktion im Geräteinneren erleichtert Routinekontrollen und spart so Kosten.

**Funktioniert jederzeit so, wie sie sollte.** Die schweizer Innovationskraft von Medela steckt hinter der langen Lebensdauer, für die unsere Pumpen bekannt sind. Die Erfahrung des Unternehmens, langlebige Materialien und eine durchdachte Bauweise gewährleisten die Zuverlässigkeit der Basic Absaugpumpe.

**Keine Probleme mit der Hygiene.** Überlegungen zur Hygiene flossen sowohl in das Design als auch in die Funktionsweise der Basic Absaugpumpe ein. Medela legte großen Wert darauf, die Bedienelemente so zu positionieren und auszugestalten, dass potenzielle Kontaminierungsrisiken reduziert werden.



## Zuverlässigkeit – Made in Switzerland

Über 50 Jahre Erfahrung mit medizinischer Vakuumtechnologie stecken in der neuen Antriebseinheit der Basic Absaugpumpe von Medela. Das hitzebeständige Hightech-Material des Zylinders sorgt für einen langdauernden, verlässlichen Betrieb. Eine Flachformfeder mit patentierter Technologie ist nur eine der vielen speziellen Merkmale dieser Pumpe.



Hochwertige, dauerhafte Bestandteile

## Hygiene

Die glatte, aus einem einzigen Stück bestehende Gehäusehaube der Pumpe erleichtert die Reinigung. Es wurden Materialien gewählt, die starken Desinfektionsmitteln standhalten können. Mit der CleanTouch-Taste am Gehäuse kann die Pumpe mit einer einfachen Berührung ein- und ausgeschaltet werden. Somit hat die Gehäusehaube keine Fugen oder Ritzen. Der Fuß-Ein-/Aus-Schalter am Rollstativ lässt während chirurgischer Eingriffe die Hände frei.



Hygienisches Gehäuse aus einem Stück.

## Raffinierte Einfachheit

Die Medela Basic Absaugpumpe ist hygienisch, verlässlich und einfach zu bedienen. Ihr Membran-Vakuumregler baut das Vakuum in Sekunden auf. Daher ist die Basic Absaugpumpe das geeignete Gerät, wenn rasche Saugleistung und geräuscharmer Betrieb erforderlich sind. Die Pumpe ist als Rack-Version sowie als tragbares und fahrbares Modell erhältlich, so dass sie auf praktische Weise im Endoskopie-Turm, am Patientenbett oder im Operationssaal positioniert werden kann. Die Pumpe können Sie mit den Einweg- oder Mehrweg-Auffangsystemen aus dem großen Zubehörangebot von Medela ergänzen.



Alle Bedienelemente befinden sich auf der Vorderseite der Pumpe

## Kurzinformationen

- Die Basic Pumpe ist eine zuverlässige, hygienische und benutzerfreundliche Absaugpumpe.
- Unsere Schweizer Entwicklungs- und Herstellungsverfahren garantieren mechanische Präzision und dadurch eine ausgezeichnete Leistung.
- Einfache Bauweise und leicht zugängliche Bestandteile verringern den Arbeitsaufwand während Routinekontrollen.
- Zuverlässigkeit dank einer Technologie, die an die neuesten Erfordernisse angepasst ist, dauerhafter Materialien und weniger Verschleißteilen.
- Eine breite Zubehörpalette ergänzt die Pumpe zu einem kompletten System, das sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lässt.
- 5 Jahre Garantie.

## Zubehör

### Einweg-Auffangsystem

Einweg-Sekretbeutel und Mehrweg-PC-Behälter gewährleisten eine hygienische, einfache Anwendung und ein effizientes Sekretmanagement. Größen: 1,5 und 2,5 Liter.



### Schläuche

Schläuche aus Silikon oder PVC.



### Mehrweg-Auffangsystem

Autoklavierbare PSU-Behälter mit Deckel fangen Sekrete einfach und effizient auf. Größen: 1, 2, 3 und 5 Liter.



### Fußvakuumregler für freihändige Vakuumregulierung

Kann an Medela Standardbehälter angeschlossen werden.



### Filter

Filter schützen die Pumpe vor Überlauf, die Umgebung vor Bakterien und neutralisieren Gerüche.



### Fuß-Ein-/Aus-Schalter

Kabellänge 3,5 m.



Ergänzen Sie Ihre Basic Pumpe mit Zubehör von Medela für Flexibilität und eine einfache Bedienung.

## Technische Daten

	Hochvakuum - 90 kPa - 675 mmHg
	Hohe Saugleistung 30 l/min
	9,3 kg (Rack-Version)

	H x B x T (Rack-Version) 210 x 305 x 375 mm
	Strom 100-240V

	ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/EWG), IIa 5 Jahre Garantie	
		
		IP21

## Medical Vacuum Technology for Healthcare Professionals

**Wenn Sie weiterführende Informationen erhalten möchten, kontaktieren Sie uns oder den für Sie zuständigen Medela Gebietsleiter.**

 Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar, Schweiz  
www.medela.com

**Ansprechpartner vor Ort:**

Medela Medizintechnik  
GmbH & Co. Handels KG  
Postfach 1148  
85378 Eching  
Germany  
Phone +49 (0)89 31 97 59-0  
Fax +49 (0)89 31 97 59 99  
info@medela.de  
www.medela.de

Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar  
Switzerland  
Phone +41 (0)848 633 352  
Fax +41 (0)41 769 51 00  
contact@medela.ch  
www.medela.ch